


# Protection de barrières de lit UNIVERSELLE

| Référence Unitaire | Référence Par paire | L1     | H1    | E1   | L2    | E2    | Nbre de clips | Poids  |
|--------------------|---------------------|--------|-------|------|-------|-------|---------------|--------|
| 07/2260U           | 07/2260P            | 90 cm  | 32 cm | 3 cm | 90 cm | 3 cm  | 2             | 0,5 kg |
| 07/2340U           | 07/2340P            | 140 cm | 32 cm | 3 cm | 45 cm | 15 cm | 4             | 0,6 kg |
| 07/2390U           | 07/2390P            | 190 cm | 32 cm | 3 cm | 60 cm | 15 cm | 5             | 1 kg   |

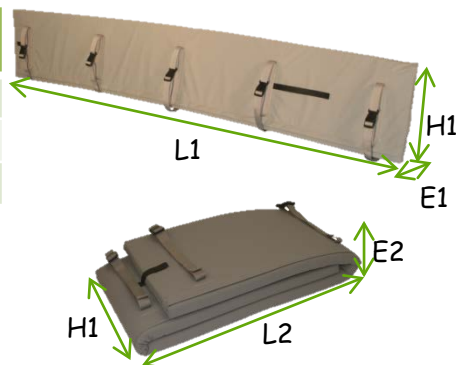

## Mise en place:

1. Positionner la protection de barrière coté patient.
2. Clipper et ajuster les sangles côté extérieur.

La protection doit impérativement être retirée avant chaque escamotage de la barrière.

Les attaches rapides permettent de retirer la protection sans modifier le réglage des sangles.



## Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 32kg/m<sup>3</sup> – Classement au feu M4.
- Housse : Pharmatex 60% Polyuréthane, 40% Polyester – Classement au feu CRIB 5.
- Boucles : 100% Acétal.

## Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol  
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse : \*    

\* Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps

**Garantie :** Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.