



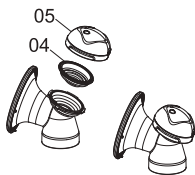

MONTAGE DU KIT TÉTERELLE

Montage de la tétérelle

Insérez le coussinet en silicone (2) dans la tétérelle (3).
N'oubliez pas de retirer la protection anti-poussière (1)
avant d'utiliser votre tire-lait.

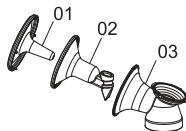


Positionnement de la valve ½ sphere et du flacon

Positionnez la valve ½ sphere (4) dans l'ouverture supérieure de votre tétérelle.

Vissez le capuchon (5) afin d'éviter toute fuite d'air.

Vissez la tétérelle sur le flacon de recueil.

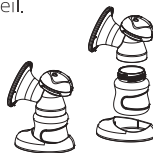


Connexion du tube et branchements

Connectez les extrémités des tubes aux kits tétérelles
et au moteur du tire-lait.




Assurez-vous que le tire-lait et les kits soient correctement assemblés.

Remarque :

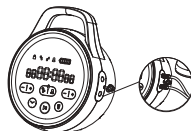
Branchez le transformateur électrique dans une
source d'alimentation si vous n'utilisez pas la batterie
au lithium.

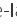

COMMENT UTILISER CE TIRE-LAIT ?


1. Positionnez correctement le(s) kit(s) tétérelle(s) sur votre poitrine.
2. Allumez votre tire-lait avec le bouton  sur le dessus de l'appareil.
3. Maintenez appuyé 3 secondes sur  pour démarrer votre tire-lait.
4. Vous démarrez alors en **mode STIMULATION** .

Afin de stimuler la montée de lait, la **Vitesse L3** est réglée à 105 cycles par minute (vous pouvez réduire à **L2** « 90T/min » ou **L1** « 70T/min »).

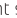Pour augmenter ou diminuer la **Puissance**, vous pouvez choisir entre les niveaux O1 et O7 en appuyant sur la touche  (à droite de l'écran).


Après 2 minutes de Stimulation, vous allez automatiquement passer en mode **Expression**

5. Lorsque vous êtes en **mode EXPRESSION** 

a. La vitesse est réglée sur **L6** (54 cycles / min), vous pouvez ajuster cette vitesse en fonction de votre confort.  (entre **L1** : 34 et **L6** : 54 cycles par minute).



Conseil : Il est conseillé de conserver la vitesse sur 48 (**L4**) en début de lactation.


Une fois la lactation bien installée (après quelques semaines), vous pouvez à loisir augmenter ou diminuer la vitesse de tirage (de **L1** à **L6**).

b. Montez progressivement la **Puissance** dans le respect de votre sensibilité; choisissez parmi 12 niveaux  entre O1 et 12.

Conseil : Veillez à bien plaquer les tétérelles sur votre poitrine pour éviter les fuites d'air.

Touche Augmentation /
Diminution de la **Vitesse**
- 2 premières minutes sur **L3**
- puis sur **L6**

Changement de mode
Stimulation  Phase 1 : 2 min
Expression  Phase 2 : tirage

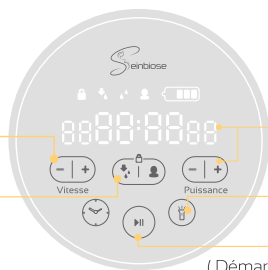

Touche Augmentation /
Diminution de la
Puissance

Bouton de veilleuse

Bouton de Pause

(Démarrage appuyez 3 secondes)