

# BB MAT +



Référence	Désignation
07.2650	BB MAT + , Culotte petit modèle
07.2652	Culotte de rechange petit modèle
07.2660	BB MAT + , Culotte grand modèle
07.2662	Culotte de rechange grand modèle

## Principes :

- Matelas incliné pour des bébés de 0 à 3 mois
- Incliné à 30°, il peut venir en complément des pathologies du système digestif, comme les reflux gastriques, et les problèmes respiratoires du nourrisson

## Conseils d'installation :

- Placer le BB MAT + dans un lit à barreau, sur le matelas
- Fixer la culotte au pupitre
- Positionner le bébé dans la culotte **et sur le dos**
- Régler les bandes auto-agrippantes de la culotte selon la morphologie du bébé

## Précautions d'emploi:

- Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangles, coutures, boucles. Ne pas utiliser un matériel endommagé !
- Au-delà de 3 mois, consulter le médecin pour la poursuite du positionnement en proclive
- Ne pas utiliser de couverture, couette, ... Ne rien placer en bas du plan incliné (peluches, jouets, ...), ni au niveau de la tête du bébé
- La température de la chambre doit se situer entre 18 et 20°C

## Attention :

**Toujours fixer la culotte au pupitre avant de positionner le bébé dans la culotte  
Votre enfant est sous votre responsabilité et doit être surveillé en permanence.**

## Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 25kg/m<sup>3</sup> – Portance 3 Kpa – Classement au feu M4
- Housse en Polyester enduction PVC : 75% : Polychlorure de Vinyle – 25 % Polyester – Classement au feu M1
- Culotte: tissu éponge 100% Coton peignée + Polyester enduction PVC : 75% : Polychlorure de Vinyle – 25 % Polyester

## Entretien :


- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol  
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse et culotte :     

Conseils de désinfection : Alkydiol spray

**Garantie :** Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n'affectent pas les qualités d'allègement de pressions.

La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.

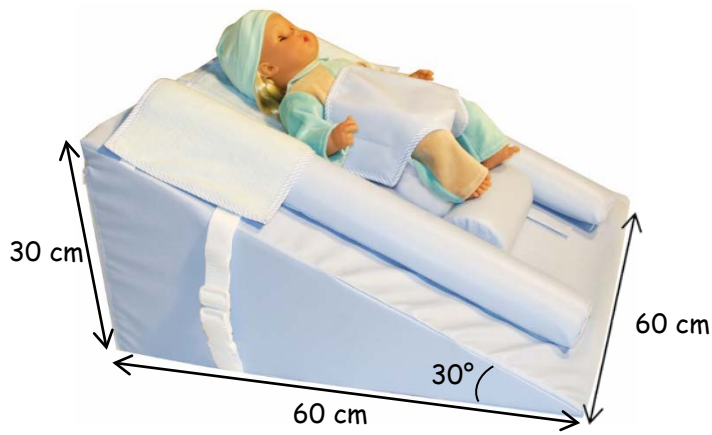

	Dimensions* (en cm)								Tour de taille
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Culotte petit modèle	62	68	21	36	10	8	30	10	De 46 à 54 cm
Culotte grand modèle	68	68	21	42	10	12	34	10	De 52 à 60 cm

\*Dimensions données à titre indicatif

