



❄️ Cryothérapie

⊕ Compressive

🏠 À domicile



ATTELLE ÉPAULE

avec coussin d'abduction



Notice d'utilisation



**You
Tube**



Ce flash code vous permet de visionner
la vidéo de mise en place de l'attelle d'épaule Igloo® :
<https://youtu.be/lxOiBstFoR8>



CONTRE-INDICATIONS

(avis médical obligatoire avant utilisation)

- Troubles de la sensibilité cutanée
- Insensibilité au froid
- Allergie au froid
- Syndrome de Raynaud
- Cryoglobulinémie
- Artérite
- Polyarthrite
- Diabète

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne doit pas être mise en contact direct avec la peau
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Ne pas percer la tubulure et le pack de gel
- Ne pas chauffer le pack de gel
- Ne pas ingérer le gel
- En cas de contact direct du gel avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau

Les attelles IGLOO® ne requièrent pas de conditions particulières de stockage, de manutention et d'élimination. En cas de pack gel percé, videz le contenu du pack dans les toilettes.



Laver à la main à l'eau tiède avec un savon doux
Ne pas utiliser d'eau de Javel, ou de détergent
Ne pas immerger l'attelle



Ne pas laver ni sécher en machine



Faire sécher suspendu
Ne pas sécher près d'une source de chaleur



Ne pas repasser




Conforme aux exigences de l'Union Européenne




Fabricant


COMPOSITION DU SET

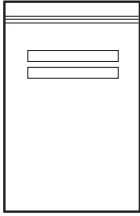


sac de congélation

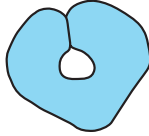


pack de gel

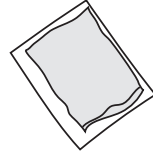


jersey de protection

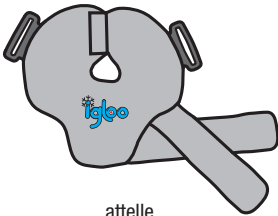

attelle

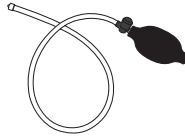


pompe et tubulure

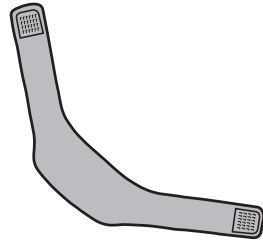


bande latérale



écharpe

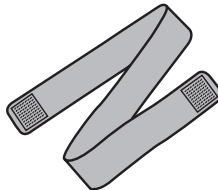

contre écharpe thoracique

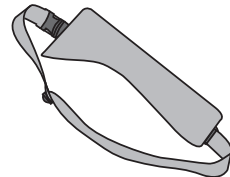


coussin d'abduction

AVERTISSEMENT


CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ SUIVANT LES INSTRUCTIONS D'UN PRATICIEN DÛMENT HABILITÉ (CHIRURGIEN, MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, PHARMACIEN...).

PRINCIPE DE MISE EN PLACE

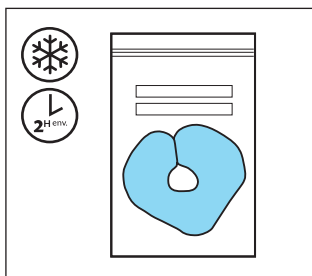


1/ Placer le pack dans le sac de congélation pendant environ 2 heures* au congélateur. À la sortie du congélateur, le pack doit être souple (sinon, laisser le pack à température ambiante le temps qu'il s'assouplisse).

**selon votre congélateur*

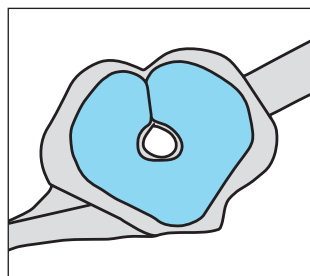

2/ Disposer le pack de gel dans l'attelle.

AVANT DE POSITIONNER L'ATELLE SUR L'ÉPAULE,
Poser l'attelle côté logo Igloo® dessus.
Placer la bande latérale sur l'attache de l'attelle.

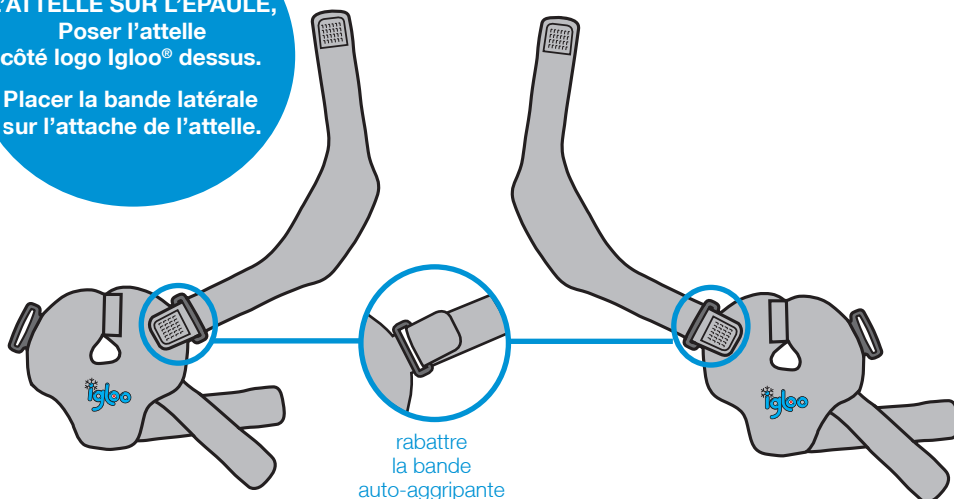

**MONTAGE POUR
ÉPAULE GAUCHE**




**MONTAGE POUR
ÉPAULE DROITE**

Ce dispositif est indiqué pour l'épaule.
Il se positionne sur l'épaule gauche comme sur la droite.



PRINCIPE DE MISE EN PLACE



3/ Le pack de gel ne doit pas être en contact direct avec la peau. Mettre un tee-shirt ou le jersey de protection. Poser l'attelle sur l'épaule et fixer les bandes autour du bras.

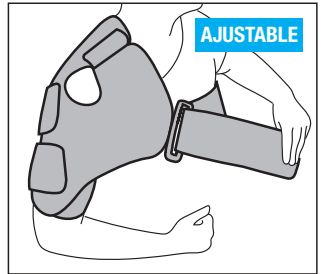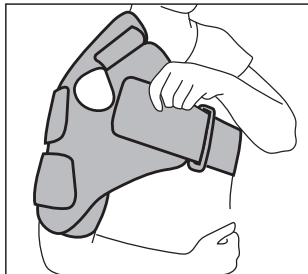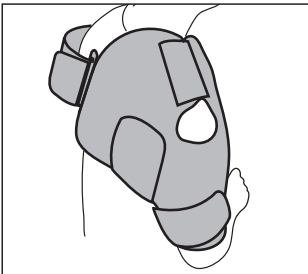

4/ Passer la bande latérale, que vous avez précédemment fixé à l'attelle, autour du torse, en la passant sous le bras. Fixer l'extrémité à l'attache de l'attelle, au niveau de la poitrine, et rabattre la bande. Ajuster la taille grâce au système de bande auto-agrippante.

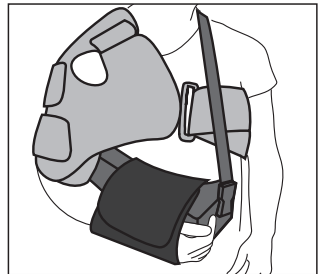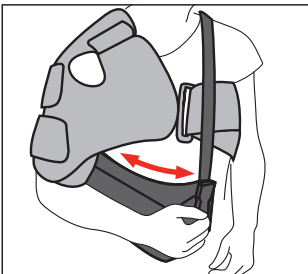


5/ Placer le coussin et sa sangle en bandouillère. Positionner le coussin sur l'intérieur de l'avant-bras au niveau du coude*. (La courbe du coussin doit épouser la courbe du corps).


6/ Maintenir le bras à l'aide de l'écharpe en l'enroulant autour du coussin et du bras.

* Le coussin est réversible gauche ou droite, la forme en «triangle» doit être placée devant.


PRINCIPE DE MISE EN PLACE

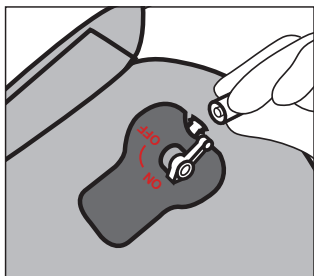


7/ Visser la pompe sur le robinet en position ON.

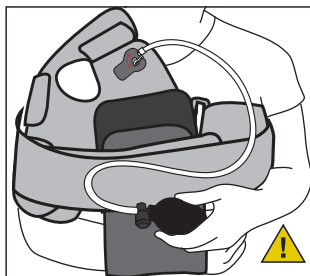

8/ Exercer 10 à 15 pressions. Le réglage de la pression se fait à l'aide de la pompe.

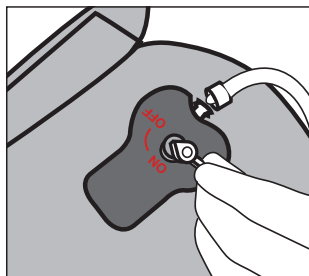

9/ Fermer le robinet en position OFF.

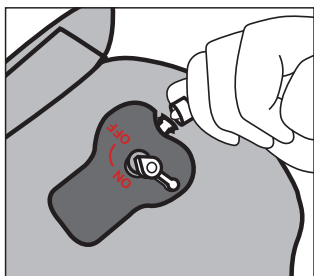

10/ Dévisser la pompe.

A la fin de la séance, retirer le pack de gel par l'ouverture au-dessus, afin de conserver les réglages de l'attelle.

Après utilisation, dégonfler l'attelle (position du robinet sur ON).

! La compression ne doit pas être excessive et doit rester confortable. En cas de sensation de fourmillement, dégonfler légèrement l'attelle.

La durée de la séance est fonction des instructions du praticien.




Préconisé pour 20 min.

UTILISATION SANS COUSSIN D'ABDUCTION

Reprendre les étapes de montage de 1 à 4



Après l'étape de montage 4, fixer l'écharpe sur l'attelle à l'aide de la bande auto-agrippante.

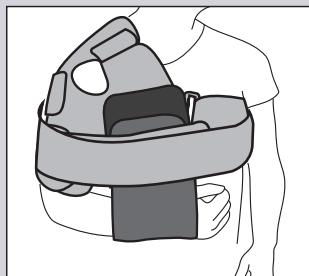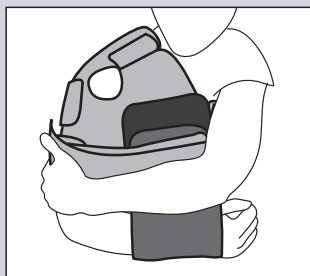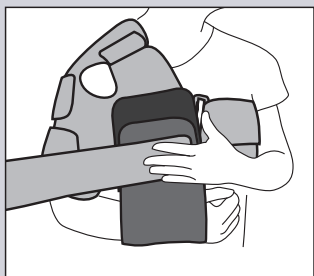

Fixer la contre-écharpe sur l'écharpe et la faire tourner autour du torse. Ensuite continuer de l'étape 7 à 10.



I MPLANTS
S ERVICE
O RTHOPÉDIE

1 RUE JULES GUESDE
91130 RIS-ORANGIS
Tél. : 01 69 02 19 20
Fax : 01 69 23 30 79
www.orthopedie-iso.fr