

Coussin hémostatique Haemoband



Désignation du produit

- «HAEMOBAND®» est un dispositif Médical de la classe I (Directive 93/42 CEE), Conforme à l'obligation de marquage CE.
- Conception et fabrication sous assurance qualité totale.

Composition

Le kit coussin hémostatique Haemoband® est constitué de :

- Une enveloppe extérieure étanche avec indication du mode d'emploi.
- Une paire de gants anallergiques, à usage unique, pour la sécurité du sauveteur.
- Une bande extensible enroulée de façon ergonomique et prête à l'emploi.
- Un coussin hémostatique.

Le coussin hémostatique se compose d'une compresse absorbante non-tissée totalement hydrophile, d'un tampon de mousse conforme aux normes médicales et d'une grande bande extensible pourvue d'un dispositif de fixation rapide.

Toxicité

- Les matières utilisées dans l'Haemoband® ont été spécialement choisies pour leur caractère hypoallergénique.
- Se référer aux procédures en vigueur pour l'élimination des déchets de soins.

Conditions de stockage et validité du produit

- Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- N'ouvrir l'enveloppe protectrice externe qu'au moment de l'utilisation afin de préserver la propreté du produit.

Nota : L'exposition aux UV, du tampon de mousse, peut entraîner une décoloration de celui-ci. Cette décoloration n'affecte en rien les performances du système.

- Validité du produit : 5 ans dans les conditions de stockage ci-dessous. A usage unique.

Significations des pictogrammes sur l'étiquetage



Ne pas réutiliser



Utiliser jusqu'à

REF

Référence du catalogue

LOT

Code du lot

Les premiers soins à un blessé

Précautions d'usage : Vérifier que le dispositif soit opérationnel avant son utilisation (date de péremption, intégrité de l'emballage).

- Mettre la paire de gants à usage unique.
- Si le blessé est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité.
- Surélever le membre du blessé
- Ne pas mettre d'antiseptique, ni d'alcool, ni d'antibiotique, ni de Mercurochrome, ni de colorant (type éosine) sur la plaie.
- Appliquer et presser fortement le coussin hémostatique sur la blessure.
- Enrouler rapidement la bande en la tendant. Réaliser les enroulements de manière à ce qu'ils recouvrent totalement la surface et la proche périphérie du tampon mousse.
- Bloquer la bande à l'aide de l'auto-agrippant.
- Adapter la tension de la bande en fonction du flux sanguin : - Si l'hémorragie persiste, tendre davantage la bande.
- Si le pouls n'est plus sensible en aval de la plaie, relâcher légèrement la tension
- Ne pas donner à boire ou à manger au blessé ; pas d'alcool, pas de café.

Prévenir les secours d'urgence (suivant la procédure interne de votre entreprise).

SAMU : 15

Pompiers : 18

Numéro d'urgence international : 112