

Domus Auto

Données Techniques Compresseur

Réglage automatique jusqu'à **250 kg** : Règle automatiquement la pression d'air à l'intérieur des cellules en fonction du poids du patient



Modes Thérapeutiques :

Fonction Tuning : Diminution ou augmentation manuelle de la pression de 5mmg/h



Fonction Surgonflage : Mode soin obligatoire pour le transfert du patient. (retour en mode dynamique après 20min.).



Mode Dynamique et Thérapeutique : Les cellules se gonflent et se dégonflent en continu, de façon alternée, afin de reproduire les mouvements naturels du sommeil et éviter une pression trop longue sur les tissus protégeant contre l'ischémie, tout en stimulant la circulation sanguine. Temps du cycle 10 min.




Mode Statique Basse Pression Continue : Mode préventif / soin de confort Réduit la pression avec 1/3 de moins que le niveau de pression en mode alterné.



Fonction Assise : Dynamique et Statique : La pression est légèrement augmentée lors du relève buste à 30°.
- Assise permanente pour un patient en position assise supérieur à 30°
- Peut être utilisée pour un patient aux muscles raides
- Procure un support stable

Domus Auto

Données Techniques Compresseur

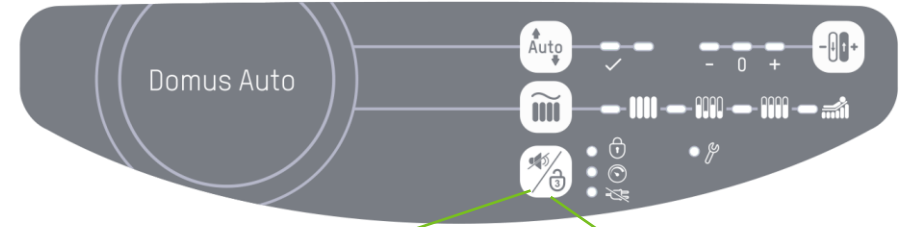


Gestion des alarmes

- Low Pressure (*sonnerie discontinue*) : pression trop basse >>> vérifier l'enclenchement du CPR en haut à gauche du matelas
- Power Failure (*sonnerie continue*) : coupure alimentation >>> Vérifier le cordon secteur

Verrouillage compresseur :

- Appuyer 3 secondes pour accéder au compresseur
- Verrouillage auto après 5 minutes
- Voyant lock/Unlock

▪ En cas de coupure électrique :

- ✓ Appuyer sur  pour stopper le son de l'alarme
- ✓ Ne rien toucher d'autre, ni sur le matelas ni sur le compresseur
- ✓ Une couche d'air de 10 cm reste gonflée par sécurité

▪ Le courant revient :

Ne rien toucher, le matelas redémarre automatiquement et revient aux réglage précédents la coupure